



Und so einfach geht's...

Die Wahl der richtigen Werkzeuge für die Ausarbeitung von Zirkon-Weißlingen ist ausschlaggebend. Die neuen **Polisoft-Schleifpads** sorgen für eine besonders schonende und schnelle Bearbeitung der Oberflächen, ohne das zu beschleifende Objekt zu beschädigen. Ideal zur „soften“ Bearbeitung der Konnektoren-/Verbinder-Reduktion von Kronen und Brücken, ohne Rillen- und Riefenbildungen an der Oberfläche. Die einzigartige Netzstruktur des **Polisoft-Schleifpads** passt sich ideal an die Oberflächenform des Objektes an.



Polisoft mittel oder **fein** wählen, um den Konnektor zu reduzieren.



Mit max. 5.000 UpM sanft und ohne Anpressdruck mit dem **Polisoft-Schleifpad** über den Konnektor fahren, um diesen auf das gewünschte Maß zu reduzieren.



Feine Rillen und Riefenbildung in der Oberfläche des Zirkons können mit dem **Polisoft fein** exakt ausgearbeitet werden. Ideal für das feine Ausdünnen des Kronenrandes.



Feine, geschmeidige Oberflächenstruktur nach Anwendung des **Polisoft-Schleifpads**.

Mälzer Dental GmbH & Co. KG
Schlesierweg 27 · 31515 Wunstorf
Tel.: +49 (0) 50 33 / 963099-0
Fax: +49 (0) 50 33 / 963099-99
E-Mail: info@maelzer-dental.de
Internet: www.maelzer-dental.de

mälzer dental

Polisoft Schleifpads

NEU



mälzer dental
FLEXIBEL. KOMPATIBEL. PASSGENAU.

Polisoft Testset

→ Optimal zur Zirkon-, Schienen- und NEM-Bearbeitung



Art.-Nr.	[52076]
Maße	Ø 22 x 5,0 mm
Körnung	mittel & fein
Inklusive eines Mandrells (Schaft 2,35 mm – Art.-Nr. 53400)	■
VE	12 Stück
Preis pro VE	9,95 €

Polisoft mittel & fein

→ Für die Bearbeitung von Zirkon-Weißlingen
 → Zur Entfernung der Anschlüsse / Konnektoren oder Verbinder
 → Zum Ausdünnen der Kronenränder
 → Für das Mattieren der Kauflächen bei NEM Kronen oder Aufbisschienen



Art.-Nr.	[52073]	[52073-50]	[52074]	[52074-50]	[52075]
Maße	Ø 22 x 5,0 mm				
Körnung	mittel	mittel	fein	fein	mittel & fein
Inklusive eines Mandrells (Schaft 2,35 mm – Art.-Nr. 53400)	■	–	■	–	–
VE	25 Stück	50 Stück	25 Stück	50 Stück	50 Stück
Preis pro VE	19,95 €	29,95 €	19,95 €	29,95 €	29,95 €

Verwendung

Edelmetalle	Nicht-Edel- metalle	Titan	PMMA, PEEK, Composite	Keramik	Zirkon
■	■	■	■	■	■

Produktparameter

	180	Körnung	mittel
		opt./max. Drehzahl ↻	5.000 UpM / 10.000 UpM
		Handstück	montiert/unmontiert
	280	Körnung	fein
		opt./max. Drehzahl ↻	5.000 UpM / 10.000 UpM
		Handstück	montiert/unmontiert